



DAG



BLIXTLÅS



2-1 FUNKTION

BRUKSANVISNING KEDJEFILT® 15 KG

Kom till ro med Somnas Kedjefilt®. Kedjorna i de längsgående kanalerna formar filten tätt intill kroppen och ger ett behagligt omslutande tryck.



ANVÄNDNING

Kedjefilt® 15 kg har insydda kedjor i längsgående kanaler. Kedjorna är monterade i båda ändar och går inte att ta ut ur täcket. Metallkedjorna är lackerade och därmed helt ljudlösa.

Kedjefilten har en 2 i 1-funktion, en kedjesida och en vadderad sida. Vilken sida man väljer att vända mot kroppen är individuellt. Med kedjorna vända mot kroppen får man en större taktil stimulering. Man får prova sig fram till vilken sida som känns bäst.

Kedjefiltens smidighet gör även att du kan vika filten om du önskar ökad tyngd någonstans på kroppen. Filten är tillverkad för att vara så sval som möjligt.

Kedjefilten används för ungdomar och vuxna och främst om du har mycket anspänning i kroppen, svår oro och ångest men också om du behöver komma ner i varv och samla dig kvickt.

TVÄTTRÅD

Använd alltid medföljande tvättpåse. Kedjefilt 15 kg ska delas innan tvätt.



Högst 60°C - skonsamt tvättprogram



Ej torktumling



Ej strykning



Tål ej blekmedel



Använd inga vätskor starkare än perkloretylen vid kemtvätt



Rekonditionering kan utföras i 70 °C



PRODUKTINFORMATION



Kedjefilten är tillverkad i material som uppfyller kraven enligt standard Antändlighet med glödande föremål (SS-EN ISO 12952-1).



Kedjefilt® är CE-godkänt enligt direktiven om medicintekniska produkter 93/42/EEG.



Kedjefilt® är en svensk patenterad produkt.

STORLEKAR/VIKTER

Vikt: 15 kg

Mått: 200x140 cm

OBSERVERA

- Vid svag lungkapacitet, rådfråga läkare före användning av tyngdfilt.
- Rådgör med läkare om inopererad utrustning skulle kunna påverkas av metallen i kedjorna.
- Beakta risk att snubbla om tyngdfilt ligger på golvet.
- Var aktsam vid svag muskelkapacitet.