



SVAL



BLIXTLÅS



2-1 FUNKTION

## BRUKSANVISNING KEDJETÄCKE® BALANCE

Kom till ro med Somnas Kedjetäcke® Balance. Kedjorna i de långsgående kanalerna formar täcket tätt intill kroppen och ger ett behagligt omslutande tryck.



### ANVÄNDNING

Kedjetäcke® Balance har kedjorna placerade mer centralt, i linje med kroppens position, vilket ger en extra omslutande effekt. Kedjetäcke® Balance bygger på Somnas egna patenterade lösning med insydda kedjor i långsgående kanaler. Kedjorna är monterade i båda ändar och går inte att ta ut ur täcket. Stålkedjorna är lackerade och därmed helt ljudlösa.

Kedjetäcke® Balance har en 2 i 1-funktion, en kedjesida och en vadderad sida. Vilken sida man väljer att vända mot kroppen är individuellt. Med kedjorna vända mot kroppen får man en större taktill stimulering. Man får prova sig fram till vilken sida som känns bäst. Kedjesidan har en textil med halvmånar för att lättare kunna skilja den mot den vadderade sidan.

Placera Kedjetäcke® Balance i ett påslakan. Man kan sova hela nätterna med täcket, men i början rekommenderas att använda täcket vid kortare stunder för tillvänjning. Öka därefter användningen successivt. Kedjetäckets smidighet gör även att det går att vika om man önskar ökad tyngd någonstans på kroppen. Täcket är tillverkat för att vara så svalt som möjligt.

Att lägga täcket över axlarna och låta det forma sig efter kroppen i sittande läge ger ett skönt lugn vid vila under dagen.

## TVÄTTRÅD

Täcke med dragkedja ska delas innan tvätt. Tvättpåse ska användas.

### TÄCKE



Skontvätt 60°C  
Rekonditionering max 70°C



Tål ej blekmedel



Ej torktumling



Torkskåp max 40°C



Ej strykning



Använd inga vätskor starkare än  
perkloretylen vid kemtvätt

### VÄSKA



Högst 60°C



Ej torktumling



Ej strykning



Ej kemtvätt

## PRODUKTINFORMATION



Kedjetäcke® Balance uppfyller kraven enligt standard Antändlighet med tändsticksliknande låga (SS-EN ISO 12952-2). Yttertyg i flamsäkert Trevira CS-material.

**Textil:** 90% Polyester, 10% Polypropylen

**Fyllning:** Stålkedjor



Kedjetäcke® Balance uppfyller kraven enligt direktiven om medicintekniska produkter 93/42/EEG.



Kedjetäcke® Balance är en svensk patenterad produkt.

## STORLEKAR/VIKTER

150 x 200 cm / 8 kg

### OBSERVERA

- Vid svag lungkapacitet, rådfråga läkare före användning av tyngdtäcke.
- Rådgör med läkare om inopererad utrustning skulle kunna påverkas av stålkedjorna.
- Beakta risk att snubbla om tyngdtäcket ligger på golvet.
- Var aktsam vid svag muskelkapacitet.
- Vid användning av hygienöverdrag, observera kvävningsrisk.