

BRUKSANVISNING KEDJEVÄST® BALANCE

Somna Kedjeväst® Balance är en dagprodukt som framförallt påverkar känsel- och muskel-/ledsinnena. Användaren får stimulering tack vare dess tyngd och omslutande effekt.



ANVÄNDNING

Västen bör användas så nära kroppen som möjligt för att uppnå bäst effekt. Vi rekommenderar att man endast använder ett linne eller en t-shirt under. Öppna karborrebanden på kedjevästens framstycke. Trä västen över huvudet. Justera därefter västens längd genom karborrebanden på axelbanden. Dra åt de tre resorbanden för att anpassa trycket mot kroppen. Justera hur tätt västen ska sitta för att ge önskad effekt.

Somna® Tyngdkrage medföljer och ger extra omfamning och tyngd över axlarna.

Kedjeväst® Balance kan med fördel användas med en tröja/jacka utanpå.

Det är individuellt hur länge man vill använda västen. Vi rekommenderar att prova kortare stunder till en början för att sedan öka längden på användningen.

TVÄTRÅD



Högst 60°C - skonsamt tvättprogram



Tål ej blekmedel



Ej torktumling



Ej strykning



Torksåp max 40°C



Använd inga vätskor starkare än perkloretylen vid kemtvätt

Krage:



Ej kemtvätt



Tål ej uppvärmning i Microvågsugn

Använd medföljande tvättpåse.

PRODUKTINFORMATION



Kedjeväst® Balance uppfyller kraven enligt standard Antändlighet avseende glödande föremål (SS-EN ISO 12952-1).



Kedjeväst® Balance är CE-godkänd enligt direktiven om medicintekniska produkter 93/42/EEG.



Kedjeväst® Balance är en svensk produkt.

STORLEKAR

Junior (4-8 år), XS, S/M, L/XL

OBSERVERA

- Vid svag lungkapacitet, rådfråga läkare före användning av tyngdväst.
- Rådgör med läkare om inopererad utrustning skulle kunna påverkas av stålkedjorna.
- Var aktsam vid svag muskelkapacitet.
- Beakta risken att fastna med västen vid lek.