



BLIXTLÅS



2-1 FUNKTION



BRUKSANVISNING KEDJETÄCKE® SENSITIVE

Kom till ro med Somnas Kedjetäcke® Sensitive. Kedjorna i de långsgående kanalerna formar täcket tätt intill kroppen och ger ett behagligt omslutande tryck.



ANVÄNDNING

Kedjetäcke® Sensitive är ett mjukare täcke tack vare den dubbla vadderingen på ena sidan. Kedjetäcke® Sensitive bygger på Somnas egna patenterade lösning med insydda kedjor i långsgående kanaler. Kedjorna är monterade i båda ändar och går inte att ta ut ur täcket. Stålkedjorna är lackerade och därmed helt ljudlösa.

Kedjetäcke® Sensitive har en 2 i 1-funktion, en kedjesida och en vadderad sida. Vilken sida man väljer att vända mot kroppen är individuellt. Med kedjorna vända mot kroppen får man en större taktil stimulering. Man får prova sig fram till vilken sida som känns bäst. Kedjesidan har en textil med halvmånar för att lättare kunna skilja den mot den vadderade sidan.

Placera kedjetäcket i ett påslakan. Du kan sova hela nätterna med täcket, men i början rekommenderas att använda täcket vid kortare stunder för tillvänjning. Öka därefter användningen successivt. Kedjetäckets smidighet gör även att du kan vika täcket om du önskar ökad tyngd någonstans på kroppen.

Att lägga täcket över axlarna och låta det forma sig efter kroppen i sittande läge ger ett skönt lugn vid vila under dagen.

TVÄTRÅD

Täcke med dragkedja ska delas innan tvätt. Tvättpåse ska användas.

TÄCKE



Skontvätt 60°C
Rekonditionering max 70°C



Tål ej blekmedel



Ej torktumling



Torka täcket direkt efter tvätt
Torskåp max 40°C



Ej strykning



Använd inga vätskor starkare än
perklöretylen vid kemtvätt

VÄSKA



Högst 60°C



Ej torktumling



Ej strykning



Ej kemtvätt

PRODUKTINFORMATION



Kedjetäcket uppfyller kraven enligt standard Antändlighet med tändsticksliknande låga (SS-EN ISO 12952-2). Yttertyg i flamsäkert Trevira CS-material.

Textil: 90% Polyester, 10% Polypropylen

Fyllning: Stålkedjor



Kedjetäcke® Sensitive uppfyller kraven enligt direktiven om medicintekniska produkter 93/42/EEG.




Kedjetäcke® Sensitive är en svensk patenterad produkt.



STORLEKAR/VIKTER

150 x 200 cm
100 x 125 cm

4, 6, 8, 10, 12, 14 kg
3, 4 kg

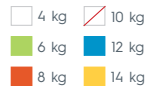

Färgmarkering på
täckets kortsida
anger täckets vikt.

OBSERVERA

- Vid svag tyngdkapacitet, rådfråga läkare före användning av tyngdtäcke.
- Rådgör med läkare om inopererad utrustning skulle kunna påverkas av stålkedjorna.
- Beakta risk att snubbla om tyngdtäcket ligger på golvet.
- Var aktsam vid svag muskelkapacitet.
- Vid användning av hygienöverdrag, observera kvävningsrisk.
- Kedjetäcke® Sensitive junior rekommenderas från 3 år.