



SVAL



GLIDELÅS



2 i 1-FUNKSJON

## BRUKSANVISNING KJEDEDYNE®

Fall til ro med Somna Kjededyne®. Kjededene i de langsgående kanalene former dynen tett inntil kroppen og gir et behagelig, omsluttende trykk.



### BRUK

Kjededyne® bygger på Somnas egne patenterte løsninger med innsydde kjeder i langsgående kanaler. Kjededene er montert i begge ender og kan ikke tas ut av dynen. Stålkjedene er lakkert og dermed helt lydløse.

Kjededyne® har en 2 i 1-funksjon, en kjedeside og en vattert side. Hvilken side man velger å snu mot kroppen er individuelt. Med kjededene inn mot kroppen får man en større taktil stimulering. Man kan gjerne prøve seg frem for å finne ut hvilken side som føles best. Kjedesiden har halvmånetrykk for å lettere kunne skille mellom den forete siden.

Ha kjededyne® i et dynetrekk. Du kan sove hele natten med dynen, men i begynnelsen anbefales det å bruke den i korte perioder for tilvenning. Øk deretter tilvenningen gradvis. Kjededynens smidighet gjør at du også kan brette den dobbelt hvis du ønsker økt tyngde et bestemt sted på kroppen. Dynen er laget for å være så sval som mulig.

Å legge dynen over skuldrene og la den forme seg etter kroppen i sitende stilling gir en behagelig ro ved hvile i løpet av dagen.

## VASKEANVISNING

Dyne med glidelås deles i to før vask. Bruk medfølgende vaskepose.

### DYNE



Maks 60° C – skånsomt vaskeprogram



Tåler ikke blekemidler



Tørk dynen direkte etter vask



Må ikke tørketromles



Må ikke strykes



Ikke bruk sterkere væsker enn perkloretylen ved rens

### VESKE



Maks 60° C



Må ikke tørketromles



Må ikke strykes



Tåler ikke rens

## PRODUKTINFORMASJON



Kjededynen oppfyller kravene i henhold til standard Antennelighet ved eksponering for glødende formål (NS-EN ISO 12952-2). Ytterstoff i flammesikkert Trevira CS-materiale.

**Tekstil:** 90% Polyester, 10% Polypropylen

**Fyll:** 100% Stålkjeder



Kjedyne® oppfyller kravene i samsvar med direktivet om medisinsk utstyr 93/42 /EEG.



Kjedyne® er et svensk patentert produkt.



## STØRRELSER/VEKT

140 x 200 cm: 4, 6, 8, 10, 12, 14 kg

100 x 140 cm: 3 og 5 kg

 4 kg  10 kg

 6 kg  12 kg

 8 kg  14 kg

Fargemerkeringen på dynens kartside viser hvilken vekt.

## MERK

- Ved nedsatt lungekapasitet konsulter lege før bruk av tyngdedyne.
- Konsulter lege dersom innoperert utstyr kan påvirkes av stålet i kjedene.  
Vær oppmerksom på risikoen for å snuble dersom tyngdedynen ligger på gulvet.
- Vær oppmerksom ved nedsatt muskelkraft.
- Ved bruk av hygienetrekk, pass på risk.