



REIBVERSCHLUSS



2-IN-1 FUNKTION

GEBRAUCHSANWEISUNG SOMNA® BLANKET BALANCE

Mit der Somna® Blanket Balance kommen Sie zur Ruhe. Die Ketten in den längsverlaufenden Kanälen sorgen dafür, dass sich die Decke eng und mit angenehmem Druck um den Körper legt.



GEBRAUCH

Bei der Somna® Blanket Balance sind die Ketten mehr zentral platziert und an der Position des Körpers ausgerichtet, wodurch das Gefühl der Geborgenheit zusätzlich verstärkt wird.

Die Somna® Blanket Balance weist eine 2-in-1-Funktion auf: eine Kettenseite und eine wattierte Seite. Letztendlich entscheiden Sie selbst, welche Seite Sie bevorzugen. Mit der Kettenseite am Körper wird eine größere taktile Stimulation erreicht. Testen Sie einfach aus, welche Seite sich am besten anfühlt. Die Kettenseite hat ein Halbmond-Textil, um es von der gepolsterten Seite zu unterscheiden.

Beziehen Sie die Somna® Blanket Balance mit einem Bettdeckenbezug. Sie können die ganze Nacht über mit der Decke schlafen. Allerdings empfehlen wir, die Decke zur Eingewöhnung anfangs für kürzere Zeiträume zu verwenden. Anschließend können Sie die Anwendungsdauer Stück für Stück erhöhen. Dank ihrer Flexibilität können Sie die Decke auch umschlagen, wenn Sie an einer bestimmten Körperstelle ein höheres Gewicht wünschen. Die Decke soll möglichst kühlend wirken.

Wenn die Decke über die Schultern gelegt wird, formt sie sich während des Sitzens nach dem Körper und sorgt für Entspannung während der Tagesruhe.

PFLEGEHINWEISE

Den im Lieferumfang enthaltenen Waschbeutel verwenden. Decken mit Reißverschluss vor dem Waschen teilen.



Schonwaschgang bei max. 60 °C



Kein Bleichmittel verwenden



Trocknen Sie die Decke sofort nach dem Waschen



Nicht in den Wäschetrockner geben



Nicht bügeln



Bei der chemischen Reinigung keine kräftigeren Flüssigkeiten als Tetrachlorethylen verwenden.



PRODUKTINFORMATIONEN



Die Somna® Blanket Balance erfüllt die Anforderungen des Standards Entzündbarkeit mit kleiner offener Flamme (SS-EN ISO 12952-2). Der Außenstoff ist aus flammsicherem Trevira CS-Material gefertigt.

Textil: 90% Polyester, 10% Polypropylen

Füllung: 100% Stahlketten



Die Somna® Blanket Balance ist CE-zertifiziert nach der Medizinprodukttrichtlinie 93/42/EWG.



Die Somna® Blanket Balance ist ein schwedisches patentiertes Produkt.

GRÖSSEN/GEWICHTSKLASSEN

200 x 140 cm / 8 kg

HINWEIS

- Bei schwacher Lungenkapazität sollte vor Anwendung einer Gewichtsdecke ein Arzt konsultiert werden.
- Erkundigen Sie sich bei Ihrem Arzt, ob implantierte Geräte durch das Metall in den Ketten beeinträchtigt werden können.
- Achten Sie auf die Stolpergefahr, wenn die Gewichtsdecke auf dem Fußboden liegt.
- Seien Sie vorsichtig bei schwacher Muskelkapazität.
- Bei Verwendung der Hygieneabdeckung Erstickungsgefahr