



ZIP



2-1 FUNCTION



ISTRUZIONI PER L'USO SOMNA® BLANKET SENSITIVE

Ritrova la serenità con Somna® Blanket. Le catenelle nei canali longitudinali consentono alla trapunta di aderire al corpo con una piacevole pressione avvolgente.



UTILIZZO

La trapunta Somna® Blanket si basa sulla soluzione brevettata Somna con catenelle cucite nei canali longitudinali. Le catenelle sono applicate su entrambe le estremità e non possono essere rimosse. Le catenelle in acciaio sono laccate e quindi assolutamente silenziose.

La trapunta Somna® Blanket è un prodotto 2-in-1, con un lato dotato di catenelle e un lato imbottito. La scelta del lato da rivolgere verso il corpo dipende dalle preferenze personali. Rivolgendo le catenelle verso il corpo si ottiene una maggiore stimolazione tattile. Si raccomanda di provare entrambi i lati per individuare quello preferito. Il lato catena ha un tessuto a mezza luna per distinguerlo facilmente dal lato imbottito.

Inserire la trapunta Somna® Blanket in un sacco copripiumino. È possibile dormire con la trapunta addosso tutta la notte, ma per i primi tempi si raccomanda di abituarci utilizzandola per periodi più brevi. Aumentare quindi il tempo di utilizzo gradualmente. La flessibilità della trapunta Somna® Blanket consente anche di ripiegarla per aumentare il peso su una parte specifica del corpo. La trapunta è realizzata per garantire la massima sensazione di freschezza. Somna® Blanket Sensitive è una trapunta più morbida e calda grazie all'imbottitura supplementare.

Appoggiare la trapunta sulle spalle, in modo che segua le linee del corpo in posizione seduta, aiuta a rilassarsi in ogni momento della giornata.

CONSIGLI PER IL LAVAGGIO

Utilizzare il sacchetto per lavaggio in dotazione. La trapunta con cerniera deve essere separata prima del lavaggio.



Max 60°C - programma delicato.



Non utilizzare liquidi più aggressivi del perclorotilene in caso di lavaggio a secco.



Non candeggiare.



Non utilizzare l'asciugatrice.



Non stirare.



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO



La trapunta Somna® Blanket è conforme ai requisiti previsti dalla norma Tessili - Valutazione dell'accendibilità degli articoli biancheria da letto (SS-EN ISO 12952-2). Tessuto esterno in materiale ignifugo Trevira CS.

Tessile: 90% Poliestere, 10% Polipropilene

Imbottitura: 100% Catene in acciaio



La trapunta Somna® Blanket è omologata CE ai sensi della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici.




La trapunta Somna® Blanket è un prodotto svedese brevettato.

DIMENSIONI/PESI

140 x 200 cm
100 x 140 cm

4, 6, 8, 10, 12, 14 kg
3, 5 kg

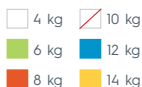

La marcatura a colori sul lato corto del coperchio indica il peso del tessuto in base ai colori sopra.

ATTENZIONE

- In caso di ridotta funzionalità polmonare, consultare il medico prima di utilizzare la trapunta a compressione.
- Consultare il medico se all'utilizzatore sono stati impiantati dispositivi che potrebbero reagire negativamente a contatto con l'acciaio delle catenelle.
- Prestare attenzione a non inciampare quando la trapunta a compressione poggia sul pavimento.
- È richiesta la massima cautela in caso di capacità muscolare ridotta.
- Quando si utilizza la copertura igienica, osservare il rischio di soffocamento.