



REIBVERSCHLUSS



2-1 FUNKTION



GEbruIKSAANWIJZING SOMNA® BLANKET SENSITIVE

Kom tot rust met de Somna® Blanket. Door de kettingen in tunnels in de lengterichting sluit de Somna® Blanket nauw rond het lichaam aan voor een prettig gevoel van geborgenheid.



GEbruIK

De Somna® Blanket is gebaseerd op de gepatenteerde oplossing van Somna met ingenaaide kettingen in tunnels in de lengterichting. De kettingen zijn aan beide kanten vastgezet en kunnen niet worden verwijderd. De stalen kettingen zijn gelakt en maken om die reden geen geluid.

De Somna® Blanket heeft een 2-in-1-functie: een kettingkant en een gewatteerde kant. Welke kant op het lichaam de voorkeur heeft, verschilt per persoon. De kettingzijde zorgt voor drukpunten tegen het lichaam en meer tactiele stimulatie. U moet proefondervindelijk vaststellen welke kant het beste voelt. Aan de kettingzijde van de deken is een halve maan zichtbaar om het eenvoudig te onderscheiden van de gewatteerde zijde.


Doe de Somna® Blanket in een dekbedovertrek. U kunt de hele nacht onder de Somna® Blanket slapen, maar in het begin raden wij aan om de Somna® Blanket kortere momenten te gebruiken om te wennen. Hierna kunt u de tijd geleidelijk verlengen. De Somna® Blanket is soepel en kan worden gevouwen voor als u ergens op uw lichaam meer druk wenst. De Somna® Blanket is ontwikkeld om zo koel mogelijk te blijven. De Somna® Blanket Sensitive is zachter en warmer dankzij de extra vulling.

Als u overdag rust, kunt u de deken voor een rustgevend effect over uw schouders leggen terwijl u zit en over uw lichaam laten vallen.


WASVOORSCHRIFTEN


Gebruik de bijgeleverde waszak. Een Somna® Blanket met rits moet vóór het wassen worden gedeeld.

 Max. 60 °C
fijnwasprogramma

 Gebruik geen sterkere vloeistoffen dan perchloorethyleen bij chemisch reinigen

 Niet bestand tegen bleekmiddel

 Laat het deken onmiddellijk drogen na het wassen

 Niet in de droogtrommel drogen

 Niet strijken



PRODUCTINFORMATIE

 De Somna® Blanket voldoet aan de norm NEN-EN-ISO 12952-2 (Textiel - Beoordeling van de ontvlambaarheid van beddengoed - Deel 1: Ontstekingsbron: smeulende sigaret). Tijd van vlambestendig Trevira CS.






Textiel: 100% Polyester Trevira CS, **Vulling:** Stalen kettingen & 100% Polyester

 De Somna® Blanket is CE-goedgekeurd volgens richtlijn 93/42/EEG van de Raad betreffende medische hulpmiddelen.

 De Somna® Blanket is een Zweeds, gepatenteerd product.

AFMETINGEN/GEWICHTEN

140 x 200 cm 4, 6, 8, 10, 12, 14 kg
100 x 140 cm 3, 4 kg

 4 kg  10 kg
 6 kg  12 kg
 8 kg  14 kg

Een kleurmarkering aan de korte zijde van de hoes geeft het corresponderende gewicht van de deken aan volgens bovenstaande kleur-coderingen.

LET OP

- Raadpleeg bij een zwakke longcapaciteit een arts vóór gebruik van de Somna® Blanket.
- Raadpleeg een arts om te horen of het staal in de kettingen geïmplanteerde apparatuur kan beïnvloeden.
- Houd rekening met struikelgevaar als de Somna® Blanket op de grond ligt.
- Let op bij spierzwakte.
- Let bij het gebruik van de hygiënehoes op mogelijk verstikkingsgevaar.
- Junior aanbevolen vanaf 3 jaar