



GLIDELÅS



2 i 1-FUNKSJON



## BRUKSANVISNING KJEDEDYNE® SENSITIVE

Fall til ro med Somna Kjededyne®. Kjededene i de langsgående kanalene former dynen tett inntil kroppen og gir et behagelig, omsluttende trykk.



### BRUK

Kjededyne® Sensitive er en mykere og varmere dyne takket være den ekstra vatteringen. Kjededyne® Sensitive bygger på Somnas egne patenterte løsninger med innsydde kjeder i langsgående kanaler. Kjededene er montert i begge ender og kan ikke tas ut av dynen. Stålkjedene er lakkert og dermed helt lydløse.

Kjededyne® Sensitive har en 2 i 1-funksjon, en kjedeside og en vattert side. Hvilken side man velger å snu mot kroppen er individuelt. Med kjedene inn mot kroppen får man en større taktil stimulering. Man kan gjerne prøve seg frem for å finne ut hvilken side som føles best. Kjedesiden har halvmånetrykk for å lettere kunne skille mellom den forete siden.

Ha kjededynen i et dynetrek. Du kan sove hele natten med dynen, men i begynnelsen anbefales det å bruke den i korte perioder for tilvenning. Øk deretter tilvenningen gradvis. Kjededynens smidighet gjør at du også kan brette den dobbelt hvis du ønsker økt tyngde et bestemt sted på kroppen.

Å legge dynen over skuldrene og la den forme seg etter kroppen i sittende stilling gir en behagelig ro ved hvile i løpet av dagen.

## VASKEANVISNING

Dyne med glidelås deles i to før vask. Bruk medfølgende vaskepose.

### DYNE



Maks 60° C - skånsomt vaskeprogram



Tåler ikke blekemidler



Tørk dynen direkte etter vask



Må ikke tørketromles



Må ikke strykes



Ikke bruk sterkere væsker enn perkloretylen ved rens

### VESKE



Maks 60° C



Må ikke tørketromles



Må ikke strykes



Tåler ikke rens

## PRODUKTINFORMASJON



Kjededynen oppfyller kravene i henhold til standard Antennelighet ved eksponering for glødende formål (NS-EN ISO 12952-2). Ytterstoff i flammesikkert Trevira CS-materiale.

**Tekstil:** 90% Polyester, 10% Polypropylen

**Fyll:** 100% Stålkjeder



Kjededyne® oppfyller kravene i samsvar med direktivet om medisinsk utstyr 93/42 /EEG.



Kjededyne® er et svensk patentert produkt.



## STØRRELSER/VEKT

140 x 200 cm      4, 6, 8, 10, 12, 14 kg  
100 x 140 cm      3, 5 kg

 4 kg     10 kg

 6 kg     12 kg

 8 kg     14 kg

Fargemarkeringen på dynens kortsida viser hvilken vekt.

## MERK

- Ved nedsatt lungekapasitet konsulter lege før bruk av tyngdedyne.
- Konsulter lege dersom innoperert utstyr kan påvirkes av stålet i kjedene.
- Vær oppmerksom på risikoen for å snuble dersom tyngdedynen ligger på gulvet.
- Vær oppmerksom ved nedsatt muskelkraft.
- Ved bruk av hygienetrekk, pass på kvelningsrisik
- Kjededyne Sensitive Junior anbefales fra 3 års alder.

SOMNA AS

info@somnahjelpemidler.no | www.somnahjelpemidler.no

