

## 使用説明書 SOMNA® WEIGHTED COLLAR



Somna® Weighted Collar は、身体や肩の緊張をほぐす、日中にご利用いただける商品です。

### 使用説明書

このおもり入りの襟は一定の安定した圧力がかかるよう、人間工学に基づいて設計されています。本製品を胸の上に乗せたり肩甲骨の間の下に置いたりすることで、筋肉に圧力がかかり、包まれているような心地良さを得ることができます。

じっと座っている時にも活動中にもご利用いただけます。このおもり入りの襟は、血液の循環と身体のバランスを整える正しい姿勢をサポートします。



## お洗濯について

必ず付属の専用洗濯ネットをご使用ください。



60° C 以下、ソフト洗いモード  
で洗濯してください。



アイロンはかけないでください。



漂白剤は使用しないでください。



ドライクリーニングはしないでく



タンブル乾燥はしないでくださ  
い。

## 製品情報



CE により医療機器指令 93/42/EEC 承認を受けています。



Somna® Weighted Collar はスウェーデンの登録意匠です。

## 製品の重量

成人用 :

2 kg、2.5 kg

小児用 :

1 kg

## 素材

生地 : 55% ポリウレタン, 45% 綿

詰め物 : 100% ポリウレタン

## 付属品

ポリエステル綿 (PC) の保護カバーを別途お求めいただくことができます。カバーは水温 60° C 以下で洗濯してください。

### 注意

- ・ 襟に熱を加えないでください。
- ・ ハッグパッドの位置にご注意。横になっているときは窒息の危険があるため、のどに乗せないでください。