

GEbruIKSAANWIJZING SOMNA® COLLAR



De Somna® Collar is bedoeld voor gebruik overdag en helpt bij het verlichten van spanning in de schouders en het lichaam.

GEbruIK

De Somna® Collar heeft een ergonomische pasvorm voor een gelijkmatige en stabiele druk. De Somna® Collar loopt over de borst en tussen de schouderbladen omlaag en drukt op de spieren wat voor een prettig gevoel van geborgenheid zorgt.

De Somna® Collar kan zowel bij stilzitten als bij activiteit worden gebruikt. De Somna® Collar draagt bij aan een betere houding, wat de bloedcirculatie en het evenwicht verbetert.



WASVOORSCHRIFTEN

Gebruik altijd de bijgeleverde waszak.



Max. 60 °C – fijnwasprogramma



Niet strijken



Niet bestand tegen bleekmiddel



Niet chemisch reinigen



Niet in de droogtrommel drogen

PRODUCTINFORMATIE



CE-goedkeuring volgens richtlijn 93/42/EEG van de Raad betreffende medische hulpmiddelen.



De Somna® Collar is een Zweeds product waarop industrieel ontwerprecht van toepassing is.

GEWICHTEN

Junior	1 kg
XS	1,5 kg
S-XL	2 kg

MATERIAAL

Textiel: 55% Polyester, 45% Katoen

Vulling: 100% Polyester

ACCESSOIRES

Er is een beschermhoes van polyester/katoen te koop als accessoire. De hoes kan op max. 60 °C worden gewassen.

LET OP

- De Somna® Collar mag niet worden verhit/verwarmd.
- Let op verkeerde positionering. Leg de kraag niet op/over de keel i.v.m. verstikkingsgevaar.