



DAY



2-1 FUNCTION

ISTRUZIONI PER L'USO SOMNA® COMFORTER

Ritrova la serenità con Somna® Comforter. Le catenelle nei canali longitudinali consentono alla copertina di aderire al corpo con una piacevole pressione avvolgente.



UTILIZZO

Queste copertine sono dotate di catenelle cucite nei canali longitudinali. Le catenelle sono applicate su entrambe le estremità e non possono essere rimosse. Le catenelle in acciaio sono laccate e quindi assolutamente silenziose.

La copertina Somna® Comforter è un prodotto 2-in-1, con un lato dotato di catenelle e un lato imbottito. La scelta del lato da rivolgere verso il corpo dipende dalle preferenze personali. Rivolgendo le catenelle verso il corpo si ottiene una maggiore stimolazione tattile. Si raccomanda di provare entrambi i lati per individuare quello preferito.

La flessibilità della copertina Somna® Comforter consente anche di ripiegarla per aumentare il peso su una parte specifica del corpo. La copertina è realizzata per garantire la massima sensazione di freschezza.

CONSIGLI PER IL LAVAGGIO

Utilizzare sempre il sacchetto per lavaggio in dotazione.



Max 60°C - programma delicato.



Non candeggiare.



Non utilizzare l'asciugatrice.



Non stirare.



Non utilizzare liquidi più aggressivi del percloroetilene in caso di lavaggio a secco.



Rigenerabile a 70°C.



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO



La copertina Somna® Comforter è realizzata in materiale conforme ai requisiti previsti dalla norma Tessili - Valutazione dell'accendibilità degli articoli biancheria da letto (SS-EN ISO 12952-1).

Tessile: 75% Poliestere, 17% Cotone, 8% Polipropilene

Imbottitura: 100% Catene in acciaio.



La copertina Somna® Comforter è omologata CE ai sensi della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici.



La copertina Somna® Comforter è un prodotto svedese brevettato.

PESI E DIMENSIONI

Somna® Comforter 4 kg:	70 x 125 cm
Somna® Comforter 5 kg:	70 x 200 cm
Somna® Comforter 7 kg:	70 x 200 cm

ATTENZIONE

- In caso di ridotta funzionalità polmonare, consultare il medico prima di utilizzare la copertina a compressione.
- Consultare il medico se dall'utilizzatore sono stati impiantati dispositivi che potrebbero reagire negativamente a contatto con l'acciaio delle catenelle.
- Prestare attenzione a non inciampare quando la copertina a compressione poggia sul pavimento.
- È richiesta la massima cautela in caso di capacità muscolare ridotta.