



2-1 FUNCTION

使用説明書 SOMNA® COMFORTER



Somna® Comforter で安心感を。縦方向の溝の内側にあるチェーンによって身体の輪郭にぴったり沿うため、包まれているような心地良さを得ることができます。

使用説明書

Somna® Comforter の縦方向の溝の内側にはチェーンが入っています。チェーンは掛け布団の両端に取り付けられ、取り外すことはできません。鋼鉄のチェーンには塗装が施されているため、とても静かです。

掛け布団には2つの機能性、つまりチェーン面とパッド面があります。どちらの面を身体側にするかは自由です。チェーン面を身体側にすると、凹凸をはっきりと感じられます。両面をお試しいただき、ご自分に合った面を見つけてください。

Somna® Comforter は柔軟なため、体の特定の部分に重みが必要な場合は折ることができます。この掛け布団は、可能な限り涼しさを得られるようにデザインされています。

お洗濯について

必ず付属の専用洗濯ネットをご使用ください。



60° C 以下、ソフト洗いモードで洗濯してください。



ドライクリーニング:PCE よりも強い洗剤は使用できません。



漂白剤は使用しないでください。



リフレッシュクリーニングは70°Cで可能です。



タンブル乾燥はしないでください。



アイロンはかけないでください。



製品情報



本製品は SS-EN ISO 12952-1 (寝具の発火性 - 着火点: くすぶるたばこの火) 基準を満たす素材を使用しています。



Somna® Comforter は、CE により医療機器指令 93/42/EEC 承認を受けています。



Somna® Comforter はスウェーデンの特許取得製品です。

重量 / 寸法

Somna® Comforter 4 kg:	125 x 70 cm
Somna® Comforter 5 kg:	205 x 70 cm
Somna® Comforter 7 kg:	205 x 70 cm

注意

- 心肺機能が低下している場合は、おもり入りの掛け布団を使用する前に医師に相談してください。
- チェーンの金属の影響を受ける可能性のある医療機器を使用されている場合は、あらかじめ主治医に相談してください。
- 床に放置しておくとなぜか危険性がありますのでご注意ください。
- 筋力が低下している場合はご注意ください。

PRODUCENT

somna®

SOMNA AB

somna.com | info@somna.com

DISTRIBUTOR



LAGOM JAPAN K.K.

lagom-japan.co.jp | info@lagom-japan.co.jp

2018年1月15日