



DAG



2 i 1-FUNKSJON

## BRUKSANVISNING KJEDETEPPE®



Fall til ro med Somna Kjedeteppe®. Kjedene i de langsgående kanalene former teppet tett inntil kroppen og gir et behagelig, omsluttende trykk.

### BRUK

Kjedeteppene har innsydde kjeder i langsgående kanaler. Kjedene er montert i begge ender og kan ikke tas ut av teppet. Stålkjedene er lakkert og dermed helt lydløse.

Kjedeteppet har en 2 i 1-funksjon, en kjedeseide og en vattert side. Hvilken side man velger å snu mot kroppen er individuelt. Med kjedene vendt inn mot kroppen får man en større taktil stimulering. Man kan gjerne prøve seg frem for å finne ut hvilken side som føles best.

Kjedeteppets smidighet gjør også at du kan brette teppet dobbelt hvis du ønsker økt tyngde et bestemt sted på kroppen. Teppe er laget for å være så svalt som mulig.

## VASKEANVISNING

Bruk alltid medfølgende vaskepose.



Maks 60 °C – skånsomt vaskeprogram



Tåler ikke blekemidler



Må ikke tørketromles



Må ikke strykes



Ikke bruk sterkere væsker enn perkloretylen ved rens



Rekondisjonering kan utføres i 70 °C



## PRODUKTINFORMASJON



Kjedeteppet er fremstilt i materiale som oppfyller kravene i henhold til standard Antennelighet ved eksponering for glødende formål (NS-EN ISO 12952-1).

**Tekstil:** 75% Polyester, 17% Bomull, 8% Polypropylen.

**Fyll:** 100% Stålkjeder



Kjedeteppe® er CE-merket i samsvar med direktivet om medisinsk utstyr 93/42 /EEG.



Kjedeteppe® er et svensk patentert produkt.

## MÅL OG VEKT

Kjedeteppe 4 kg:	70 x 125 cm
Kjedeteppe 5 kg:	70 x 200 cm
Kjedeteppe 7 kg:	70 x 200 cm

### MERK

- Ved nedsatt lungekapasitet bør lege konsulteres før bruk av tyngdeteppe.
- Konsulter lege dersom innoperert utstyr kan påvirkes av stålet i kjedene.
- Vær oppmerksom på risikoen for å snuble dersom tyngdeteppet ligger på gulvet.
- Vær oppmerksom ved nedsatt muskelkraft.