



KÜHL



REIßVERSCHLUSS



2-IN-1 FUNKTION

## GEbruIKSAANWIJZING SOMNA® BLANKET BALANCE

Kom tot rust met de Somna® Blanket Balance. Door de kettingen in tunnels in de lengterichting sluit de deken nauw rond het lichaam aan voor een prettig gevoel van geborgenheid.



### GEbruIK

Bij de Somna® Blanket Balance zijn de kettingen meer centraal en in lijn met de positie van het lichaam aangebracht. Dit geeft een extra prettig gevoel van geborgenheid.

De Somna® Blanket Balance heeft een 2-in-1-functie: een kettingkant en een gewatteerde kant. Welke kant op het lichaam de voorkeur heeft, verschilt per persoon. De kettingzijde zorgt voor drukpunten tegen het lichaam en meer tactiele stimulatie. U moet proefondervindelijk vaststellen welke kant het beste voelt. Aan de kettingzijde van de deken is een halve maan zichtbaar om het eenvoudig te onderscheiden van de gewatteerde zijde.

Doe de Somna® Blanket Balance in een dekbedovertrek. U kunt de hele nacht onder de deken slapen, maar in het begin raden wij aan om de deken kortere momenten te gebruiken om te wennen. Hierna kunt u de tijd geleidelijk verlengen. De Somna® Blanket is soepel en kan worden gevouwen voor als u ergens op uw lichaam meer druk wenst. De Somna® Blanket is ontwikkeld om zo koel mogelijk te blijven.

Als u overdag rust, kunt u de deken voor een rustgevend effect over uw schouders leggen terwijl u zit en over uw lichaam laten vallen.

## WASVOORSCHRIFTEN

Gebruik de bijgeleverde waszak. Een Somna® Blanket met rits moet vóór het wassen worden gedeeld.



Max. 60 °C  
fijnwasprogramma



Gebruik geen sterkere vloeistoffen dan perchloorethyleen bij chemisch reinigen



Niet bestand tegen bleekmiddel



Laat het deken onmiddellijk drogen na het wassen



Niet in de droogtrommel drogen



Niet strijken



## PRODUCTINFORMATIE



De Somna® Blanket Balance voldoet aan de norm NEN-EN-ISO 12952-2 (Textiel - Beoordeling van de ontvlambaarheid van beddengoed - Deel 1: Ontstekingsbron: smeulende sigaret). Tijk van vlambestendig Trevira CS.

**Textiel:** 100% Polyester Trevira CS, **Vulling:** Stalen kettingen & 100% Polyester



De Somna® Blanket Balance is CE-goedgekeurd volgens richtlijn 93/42/EEG van de Raad betreffende medische hulpmiddelen.



De Somna® Blanket Balance is een Zweeds, gepatenteerd product.

## AFMETINGEN/GEWICHTEN

200 x 140 cm / 8 kg

### LET OP

- Raadpleeg bij een zwakke longcapaciteit een arts vóór gebruik van een Somna® Blanket.
- Raadpleeg een arts om te horen of het staal in de kettingen geïmplanterde apparatuur kan beïnvloeden.
- Houd rekening met struikelgevaar als de Somna® Blanket op de grond ligt.
- Let op bij spierzwakte.
- Let bij het gebruik van de hygiënehoes op mogelijk verstikkingsgevaar.