



DAG



SOMNA® VEST JUNIOR & AIKUISET



IRROTETTAVA KAULUS SOMNA® VEST
-LIIVIIN

KÄYTTÖOHJE SOMNA® VEST 2.0

Somna® Vest on päivisin käytettävä liivi, joka vaikuttaa tunto-, lihas- ja nivelaistiin. Paino ja sisään sulkeva tunne stimuloivat käyttäjän aisteja.

KÄYTTÖ

Liiviä tulee käyttää mahdollisimman lähellä vartaloa, esimerkiksi t-paidan päällä. Lisäksi säädettävät soljet tulee kiristää parhaan vaikutuksen saamiseksi. Liiviä ja painokaulusta voi käyttää yhdessä tai erikseen. Somna® Vest -liivin päällä voi käyttää puseroa tai takkia.

Paino ja paineen tunne kehoa vasten vaikuttavat tunto-, tasapaino-, lihas- ja nivelaisteihin, millä on rauhoittava vaikutus.

Somna® Vest on valmistettu kestävästä kankaasta.

Liivin kireyttä voi itse säätää halutun vaikutuksen saamiseksi.

PESUOHJE

Pestään mukana tulevassa pesupussissa.



Enintään 60 °C – hienope-suhjelma



Liivi: Kemiallinen pesu tetrakloorietaanillä



Valkaisu kielletty



Kaulus: Kemiallinen pesu kielletty



Rumpukuivaus kielletty



Kaulusta ei saa kuumentaa.



Silitys kielletty

TUOTETIEDOT



Somna® Vest täyttää vuodevaatteiden syttyvyyttä koskevan SFS-EN ISO 12952-1 -standardin vaatimukset.

Tekstiili: 70% Polyesteriä, 30% Puuvilla

Täyte: 100% Teräsketjut



Somna® Vest on CE-hyväksytty lääkintälaitedirektiivin 93/42/ETY mukaisesti.



Somna® Vest on ruotsalainen tuote.

KOOT

Aikuiset:

X-Small, Small, Medium, Large, X-Large

Junior

110/122 (4-7 vuotta), 128/140 (7-10 vuotta), 146/158 (10-13 vuotta)

HUOMAA

- Jos käyttäjän keuhkojen toiminta on heikentynyt, käänny lääkärin puoleen ennen liivin käyttämistä.
- Käänny lääkärin puoleen, jos käyttäjällä on implantti tai lääkinnällinen apuväline, jonka toimintaa tuotteen sisältämä metalli voi häiritä.
- Heikentynyt lihasvoima voi aiheuttaa riskin.
- Liivi voi muodostaa kiinnijäämisen riskin leikeissä.

PRODUCENT

somna®

SOMNA AB

info@somna.se | www.somna.se

FINSK DISTRIBUTÖR

ALGOL
TREHAB

ALGOL THREHAB

www.algol-trehab@algol.fi | www.algolthrehab.fi