



SOMNA® VEST JUNIOR &
ADULTE



COL AMOVIBLE POUR SOMNA®
VEST

MODE D'EMPLOI SOMNA® VEST 2.0

Somna Vest 2.0 est un produit de jour, qui impacte principalement les sens de la perception, des muscles et de l'orientation. L'utilisateur est stimulé par le poids du gilet et son effet enveloppant.

UTILISATION

Le gilet doit être utilisé le plus près possible du corps, par exemple avec un t-shirt en dessous, et les attaches ajustables doivent être tirées pour atteindre le meilleur effet possible. Le gilet et le col peuvent être utilisés ensemble ou chacun séparément.

Pour plus de commodité, utiliser le gilet avec un pull/veste par dessus.

Le poids et la pression contre le corps stimulent les sensations tactiles et proprioceptives, suscitant un effet apaisant.

Somna® Vest est fabriqué dans un tissu résistant.

Vous choisissez vous-même le degré de serrage pour obtenir l'effet souhaité.

CONSEILS D'ENTRETIEN

Utiliser le filet de nettoyage fourni.



Maximum 60° C – programme doux



Gilet : N'utiliser aucun liquide plus puissant que le perchloroéthylène en cas de nettoyage à sec



Pas de produits blanchissants



Pas de séchage tambour



Col : Pas de nettoyage à sec



Pas de repassage



Le col ne doit pas être chauffé.

INFORMATIONS PRODUIT



Somna® Vest répond aux exigences de la norme d'allumabilité sous l'action d'une cigarette en combustion (ISO 12952-1).

Textiles: 70% Polyester, 30% Coton

Garnissage: 100% Chaînes en acier



Somna® Vest est approuvé CE conformément à la directive 93/42/CEE sur les dispositifs médicaux



Somna® Vest est un produit suédois.

TAILLES

Adulte:

X-Small, Small, Medium, Large, X-Large

Junior

110/122 (4-7 ans), 128/140 (7-10 ans), 146/158 (10-13 ans)

REMARQUE

- En cas de faible capacité pulmonaire, demander conseil à un médecin avant d'utiliser un gilet lourd.
- Demander conseil à un médecin pour savoir si le dispositif implanté pourrait être impacté par l'acier des chaînes.
- Faire attention en cas de faible capacité musculaire.
- Faites attention au risque de se coincer avec le gilet en cas de jeux.