



使用説明書 SOMNA® VEST BALANCE

Somna® Vest Balance は、主に触感および筋肉/関節の感覚に効果のある、日中にご利用いただける製品です。ベストの重みと包まれているような感覚により、体に刺激を得ることができます。



使用説明書

最大限の効果を得るために、なるべく肌の近くにベストを着用してください。タンクトップなどの下着やシャツの上にベストを着用されることをおすすめします。ベストの前のマジックテープストラップを開きます。ベストを頭からすっぽりかぶります。肩のストラップのマジックテープを使って長さを調節します。体に圧力をかけるため、3本の伸縮性ストラップを締めます。ご自身の必要に合わせて締め付けの度合いを調整してください。

Somna® Vest Balance はセーターやジャケットの下の着用にも最適です。

1日の着用時間はお好みにより決めていただけます。まず短時間使用し、次第に使用時間を長くすることをおすすめいたします。

Somna® Weighted Collar と組み合わせてご使用いただくと、さらに高い効果が期待できます。

お洗濯について



60°C以下、ソフト洗いモードで洗濯してください。



ドライクリーニングの際は、PCEよりも強い洗浄液は使用できません。



タンブル乾燥はしないでください。



アイロンはかけないでください。



漂白剤は使用しないでください。

付属の専用洗濯ネットをご使用ください。

製品情報



Somna® Vest Balance は SS-EN ISO 12952-2 (寝具の発火性 - 着火点: くすぶるたばこの火) 基準を満たしています。



Somna® Vest Balance は、CE により医療機器指令 93/42/EEC 承認を受けています。



Somna® Vest Balance はスウェーデンの製品です。

サイズ

成人用:

小児用 (4 ~ 8 歳)、XXS/XS、S/M、L/XL

注意

- 心肺機能が低下している場合は、おもり入りベストを使用する前に医師にご相談ください。
- チェーンの金属の影響を受ける可能性のある医療機器を使用されている場合は、あらかじめ医師にご相談ください。
- 筋力が低下している場合はご注意ください。
- 動き回る際にベストが引っかからないようにご注意ください。