



## ISTRUZIONI PER L'USO SOMNA® VEST BALANCE

Il gilet Somna® Vest Balance è un prodotto per uso diurno che agisce in particolare sulla sensibilità tattile e su quella di muscoli/articolazioni. L'utilizzatore è stimolato sia dalla compressione che dall'effetto avvolgente.

### UTILIZZO

Per garantire la massima efficacia, il gilet deve essere indossato il più vicino possibile al corpo. Sotto il gilet, si raccomanda di indossare solamente una canottiera o una T-shirt. Aprire i nastri in velcro sul davanti del gilet. Infilare il gilet dalla testa. Regolare quindi la lunghezza del gilet agendo sui nastri in velcro sulle spalline. Stringere i tre nastri elasticizzati per adattare la pressione sul corpo. Regolare l'aderenza del gilet in modo da ottenere l'effetto desiderato.

Sopra il gilet Somna® Vest Balance si possono indossare ad es. un maglione o una giacca.

Ognuno può decidere liberamente per quanto tempo utilizzare il gilet. Inizialmente, si raccomanda di provare per periodi brevi per poi prolungare il tempo di utilizzo.

Consigliato in combinazione con Somna® Collar per aumentarne l'efficacia.

## CONSIGLI PER IL LAVAGGIO

Utilizzare il sacchetto per lavaggio in dotazione.



Max 60°C - programma delicato.



Gilet: Non utilizzare liquidi più aggressivi del percloroetilene in caso di lavaggio a secco.



Non candeggiare.



Copricollo: Non lavare a secco.



Non utilizzare l'asciugatrice.



Non riscaldare il copricollo.



Non stirare.

## INFORMAZIONI SUL PRODOTTO



Il gilet Somna® Vest Balance è conforme ai requisiti previsti dalla norma Tessili - Valutazione dell'accendibilità degli articoli biancheria da letto (SS-EN ISO 12952-1).

**Tessile:** 70% Poliestere, 30% Cotone

**Imbottitura:** 100% Catene in acciaio



Il gilet Somna® Vest Balance è omologato CE ai sensi della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici.



Il gilet Somna® Vest Balance è un prodotto svedese.

## DIMENSIONI

Junior (4-8 anni), XS, S/M, M/L, L/XL

### ATTENZIONE

- In caso di ridotta funzionalità polmonare, consultare il medico prima di utilizzare il gilet a compressione.
- Consultare il medico se all'utilizzatore sono stati impiantati dispositivi che potrebbero reagire negativamente a contatto con l'acciaio delle catenelle.
- È richiesta la massima cautela in caso di capacità muscolare ridotta.
- Prestare attenzione in quanto il gilet potrebbe restare impigliato durante il gioco.