



## GEBRUIKSAANWIJZING SOMNA® VEST BALANCE

Het Somna® Vest Balance is bedoeld voor gebruik overdag en beïnvloedt vooral de zintuiglijke waarneming van gevoel en spieren/gewrichten. De gebruiker wordt gestimuleerd door het gewicht en gevoel van geborgenheid.

### GEBRUIK

Het vest moet voor het beste effect zo dicht mogelijk op het lichaam worden gedragen. Wij raden aan om er alleen een hemd of T-shirt onder te dragen. Open het klittenband aan de voorkant van het Somna® Vest. Trek het vest over uw hoofd. Stel hierna de lengte van het vest af met het klittenband op de schouderbanden. Trek de drie klittenbanden aan om de druk op het lichaam aan te passen. Stel in hoe strak het vest moet zitten voor het gewenste effect.

Het Somna® Vest Balance wordt bij voorkeur gedragen met een trui of jas erover.

Het verschilt per persoon hoe lang u het vest wilt dragen. Wij raden aan om het vest in het begin kortere perioden te dragen om de gebruiksduur vervolgens uit te breiden.

Combineer voor extra effect bij voorkeur met de Somna® Collar.

## WASVOORSCHRIFTEN

Gebruik de bijgeleverde waszak.



Max. 60 °C – fijnwasprogramma



Somna® Vest: Gebruik geen sterkere vloeistoffen dan perchloorethyleen bij chemisch reinigen



Niet bestand tegen bleekmiddel



Somna® Collar: Niet chemisch reinigen



Niet in de droogtrommel drogen



De Somna® Collar mag niet worden verhit/verwarmd.



Niet strijken

## PRODUCTINFORMATIE



Het Somna® Vest Balance voldoet aan de eisen in de norm NEN-EN-ISO 12952-1 (Textiel - Beoordeling van de ontvlambaarheid van beddengoed - Deel 1: Ontstekingsbron: smeulende sigaret).

**Textiel:** 70% Polyester, 30% Katoen

**Vulling:** 100% Stalen kettingen



Het Somna® Vest Balance is CE-goedgekeurd volgens richtlijn 93/42/EEG van de Raad betreffende medische hulpmiddelen.



Het Somna® Vest Balance is een Zweeds product.

## AFMETINGEN

Junior (4-8 jaar), XS, S/M, M/L, L/XL

### LET OP

- Raadpleeg bij een zwakke longcapaciteit een arts vóór gebruik van het Somna® Vest.
- Raadpleeg een arts om te horen of het staal in de kettingen geïmplanteerde apparatuur kan beïnvloeden.
- Let op bij spierzwakte.
- Let op: het Somna® Vest kan tijdens het spelen aan voorwerpen blijven haken.