

BRUKSANVISNING SOMNA® HYGIENÖVERDRAG



NATT



DAG

Mått på överdrag:

150x200 cm

100x125 cm

70x200 cm

70x125 cm

Passar tyngdprodukt:

Kedjetäcke®

Kedjetäcke® Junior

Kedjefilt® lång

Kedjefilt® kort



TVÄTTRÅD



Högst 90°C - skonsamt
tvättprogram



Tål ej blekmedel



Ej torktumling



Ej strykning




Ej kemtvätt


PRODUKTINFORMATION




Yttertyg i flamsäkert material.
Textil: 50% Polyuretan, 50% Polyester

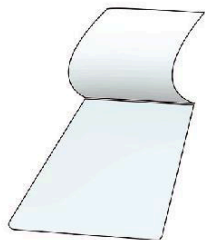

ÖPPNA PÅ TRE* SIDOR

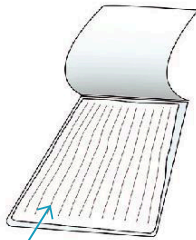

LÄGG I
TÄCKET/FILTEN

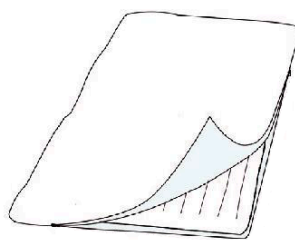

STÄNG

* Hygienöverdrag för Kedjetäcke® Junior och Kedjefilt® kort öppnas endast på en sida.

OBSERVERA

- Hygienöverdraget är utfört i ett tätt material. Beakta kvävningsrisk.