

# GEBRUIKSAANWIJZING SOMNA® HYGIENE COVER

<b>Afmetingen:</b>	<b>Geschikt voor de volgende verzwaringsproducten:</b>
140x200 cm	Somna® Blanket
100x140 cm	Somna® Blanket Junior
70x200 cm	Somna® Blanket lang
70x125 cm	Somna® Blanket kort



## WASVOORSCHRIFTEN



Max. 90 °C - fijnwasprogramma



Niet strijken



Niet bestand tegen bleekmiddel



Niet chemisch reinigen




Niet in de droogtrommel drogen


## PRODUCTINFORMATIE




Tijk van vlambestendig.  
**Textiel:** 50% Polyurethaan, 50% Polyester

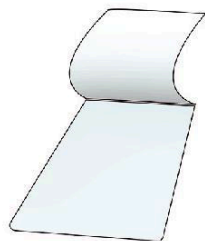

DRIE\* KANTEN OPEN

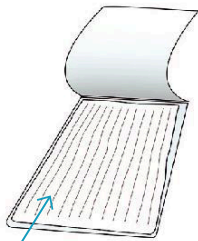

DOE DE BLANKET/  
COMFORTER

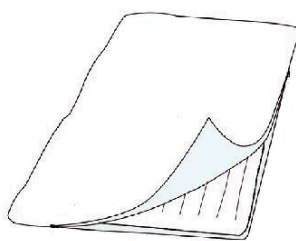

DICHT

\* 100x140 cm & 70x125 cm opent alleen op één pagina.

## LET OP

- De Somna® Hygiene Cover is gemaakt van een dicht materiaal. Denk aan verstikkingsgevaar.

PRODUCENT

**somna®**

SOMNA AB

info@somna.com | www.somna.com

DISTRIBUTEUR

**Senso-Care**

SENSO-CARE

info@sensocare.nl | www.sensocare.nl